

Horizon® tiskárna

Pokyny pro čištění

**Technické
informace**

Čistící souprava pro tiskárnu Horizon obsahuje dva druhy lihových utěrek k čištění určitých vnitřních komponentů multi-mediální suché tiskárny Horizon. Tyto technické informace popisují postup pro použití čistících utěrek.

Tyto čistící postupy byste měli provádět jako součást pravidelné údržby nebo když se znatelně sníží kvalita obrazu nebo výkon tiskárny. Doporučený plán údržby a tabulka odstraňování závad viz *Uživatelská příručka tiskárny Horizon* nebo *Úvodní příručka tiskárny Horizon*.

Někteří uživatelé tiskárny Horizon k čištění podávacích válečků raději používají čistící kazetu Horizon než čistící utěrku na PLATEN ROLLER (VÁLEC). Čistící kazetu Horizon (díl č. SP-00279) lze objednat u zástupce Codonics.

Čištění tepelné tiskové hlavy a válce


1. Stiskněte tlačítko **MENU** na tiskárně.
Zobrazí se Main Menu (hlavní nabídka).
2. Vyberte položku nabídky Open Top Cover (Otevřít horní kryt).
Tiskárna se zastaví a po minutě, kdy vnitřní komponenty vychladnou, se horní kryt pootevře.
3. Otevřete horní kryt úplně.

UPOZORNĚNÍ: Když je kryt tiskárny otevřený, dotýkejte se pouze těch vnitřních komponentů, které jsou obarveny zeleně (kromě podávacích válečků). Odstraňte prsteny, vázanky, bižuterii a další předměty a sepněte si vlasy dozadu, aby se nedostaly nebo nezachytily do tiskárny.

Je-li nasazena barevná páska, přikročte ke kroku 4. Jinak přejděte ke kroku 7.

4. Odstraňte barevnou pásku, jak je zobrazeno na následujícím obrázku.

Poznámka: Pokud páska není nasazena v tiskárně, měla by se chránit před prachem a nečistotami. Pásku nenechávejte ležet na stole – statickým výbojem se na ni může nalepit prach ze stolu.

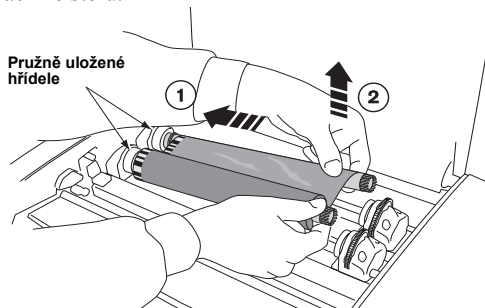


5. Z nabídky Open Top Cover (Otevřít horní kryt) vyberte položku Move Ribbon Carriage (Posunout kazetu s páskou).
6. Stiskněte **▼** k posunu kazety s páskou dolů a ven z uložení.

7. Najděte tiskovou hlavu a špičku, jak je zobrazeno na následujícím obrázku.


POZOR: Aby nedošlo k poškození tepelné tiskové hlavy:

- Při čištění používejte pouze čistící utěrku na PRINT HEAD (TISKOVOU HLAVU).
- Pohledem dovnitř ze strany tiskárny najdete oranžový nebo bílý válec a vodící lištu donoru, zobrazené na následujícím obrázku.

UPOZORNĚNÍ: Válec (oranžový nebo bílý).

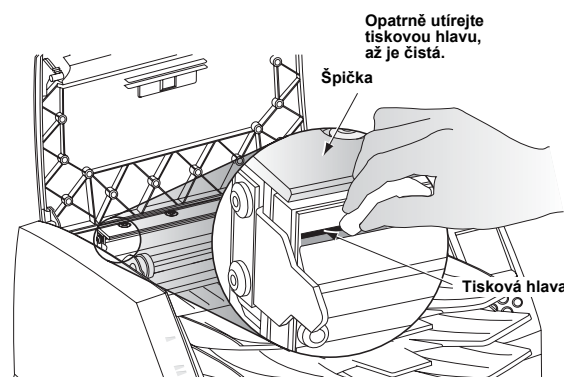

8. Čistící utěrkou PRINT HEAD (TISKOVOU HLAVU), která je obsažena v čistící soupravě tiskárny, opatrně utírejte tam a zpět po celé délce tiskové hlavy mírným tlakem. Čistící utěrka může ztratit barvu. Opakujte pohyb tam a zpět, až bude tisková hlava úplně čistá.
9. Odstraňte všechny prach nebo jiné nečistoty ze špičky.
10. Pohledem dovnitř ze strany tiskárny najdete oranžový nebo bílý válec a vodící lištu donoru, zobrazené na následujícím obrázku.

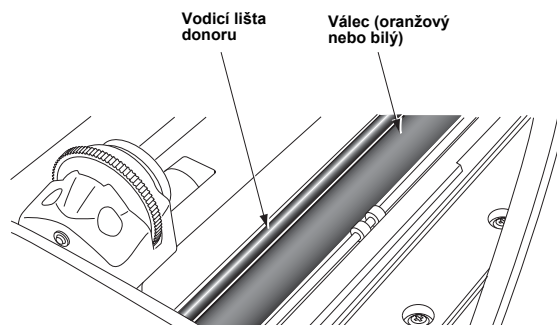

11. Je-li zobrazena nabídka Move Ribbon Carriage (Posunout kazetu s páskou), stiskněte **◀** pro návrat do nabídky Open Top Cover (Otevřít horní kryt).
12. Z nabídky Open Top Cover (Otevřít horní kryt) vyberte položku Rotate Platen (Otočit válec).
Zobrazí se nabídka Rotate Platen (Otočit válec).

13. Pomocí čisticí utěrky na PLATEN ROLLER (VÁLEC), obsažené v čisticí soupravě tiskárny, třete utěrkou pouze po celé délce válce od jednoho konce k druhému, až budou všechny viditelné nečistoty odstraněny. Netřete zpět a dopředu.

Pro krokové otáčení válcem stiskněte klávesu ▲ nebo ▼, abyste mohli vyčistit celý jeho povrch.

POZOR: Při čištění válce používejte pouze čisticí utěrku na PLATEN ROLLER (VÁLEC). Při použití čisticí utěrky na PRINT HEAD (TISKOVOU HLAVU) může dojít k poškození válce.

14. Odstraňte všechny prach a jiné nečistoty z vodící lišty donoru pomocí čisticí utěrky na PLATEN ROLLER (VÁLEC) nebo na PRINT HEAD (TISKOVOU HLAVU), obsažené v čisticí soupravě tiskárny.

15. Počkejte, až tepelná tisková hlava a válec úplně uschnou.


POZOR: Před použitím tiskárny musí být tepelná tisková hlava úplně suchá. Nechte hlavu opět zahřát, pokud je ještě mokrá, způsobí poškození.

Jestliže potřebujete znovu založit barevnou pásku, jděte ke kroku 16. Jinak přejděte ke kroku 18.

16. Z nabídky Open Top Cover (Otevřít horní kryt) vyberte položku Move Ribbon Carriage (Posunout kazetu s páskou). Stiskněte

▲ pro posun kazety s páskou nahoru, abyste mohli založit barevnou pásku.

17. Založte barevnou pásku, jak je zobrazeno na následujícím obrázku.

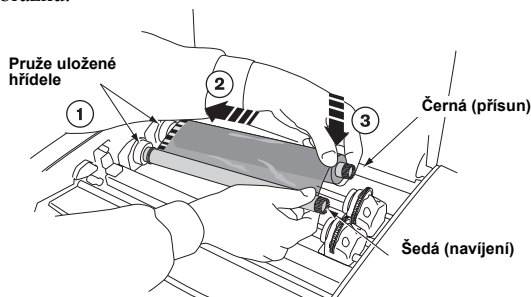


18. Zavřete horní kryt.


Čištění podávacích válečků

1. Stiskněte tlačítko PAUSE na tiskárně a počkejte, až se tiskárna přepne do stavu pozastavení.
2. Odstraňte přijímací zásobníky, jak je zobrazeno na následující obrázku.

UPOZORNĚNÍ: Když jsou přijímací zásobníky odstraněny, dotýkejte se pouze těch vnitřních komponentů, které jsou obarveny zeleně (kromě podávacích válečků). Odstraňte prsteny, vázanky, bižuterii a další předměty a sepněte si vlasy dozadu, aby se nedostaly nebo nezachytily do tiskárny.

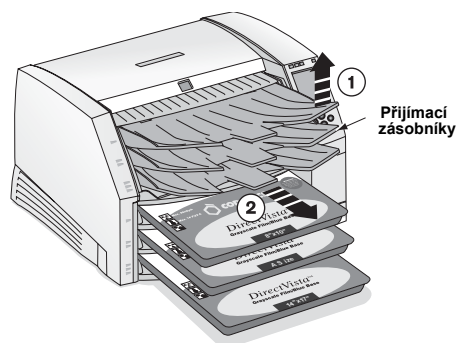


3. Položte přijímací zásobníky na rovnou plochu, jak je zobrazeno na následujícím obrázku.

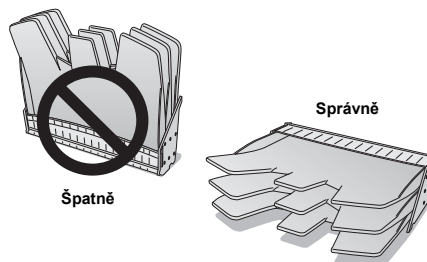

4. Odstraňte ze vstupních štěrbin všechny kazety.

5. Najděte podávací válečky.

Jsou tam tři podavače, jeden pro každou vstupní štěrbinu. Horní podavač je zobrazen na následujícím obrázku.

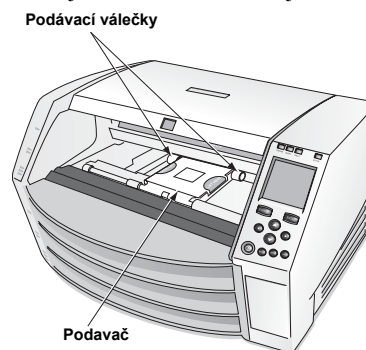

6. Pomocí čisticí utěrky na PLATEN ROLLER (VÁLEC), obsažené v čisticí soupravě tiskárny utřete každý podávací váleček. Čisticí utěrka může ztratit barvu.

POZOR: Podávacích válečků se nedotýkejte prsty; mastnota z prstů se obtížně odstraňuje a mohla by nakonec válečky poškodit. Používejte pouze čisticí utěrku na PLATEN ROLLER (VÁLEC), použitím čisticí utěrky na PRINT HEAD (TISKOVOU HLAVU) může dojít k poškození.

7. Počkejte, až podávací válečky úplně uschnou.
8. Vraťte na místo přijímací zásobníky a všechny kazety s médii, které byly vyjmuty.



17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
Email info@codonics.com
www.codonics.com

Codonics Limited KK
New Shibaura Bldg. F1
1-3-11, Shibaura
Minato-ku, Tokyo, 105-0023 JAPAN
Tel.: 81-3-5730-2297
Fax: 81-3-5730-2295