

# Horizon® Imager

## Reinigingsinstructies

Het reinigingspakket voor de Horizon Imager bevat twee soorten alcoholdoekjes waarmee u bepaalde interne onderdelen van de Horizon Multi-media Dry Imager kunt reinigen. In deze technische instructies wordt uitgelegd hoe u de reinigingsdoekjes gebruikt.

U dient deze reinigingsprocedures uit te voeren als onderdeel van het normale onderhoud of wanneer de beeldkwaliteit of afdrukprestaties merkbaar afnemen. Zie de *gebruikershandleiding bij de Horizon Imager* of *beginnershandleiding van Horizon* voor het aanbevolen onderhoudsschema en tabellen voor het oplossen van problemen.

Sommige gebruikers maken voor het reinigen van de doorvoerwielen wellicht liever gebruik van de reinigingscassette van Horizon dan het reinigingsdoekje voor de PLATEN ROLLER (drukrol). U kunt de Horizon reinigingscassette, onderdeelnummer SP-00279, bestellen bij uw Codonics-vertegenwoordiger.

### De thermische printkop en drukrol reinigen


1. Druk op de knop  op de imager.  
Het Main Menu (Hoofdmenu) wordt geopend.
2. Selecteer de menuoptie Open Top Cover (Bovenklep openen).  
De imager wordt gepauzeerd en nadat gedurende een minuut de interne onderdelen zijn afgekoeld, wordt de bovenklep gedeeltelijk geopend.
3. Open de bovenklep volledig.

**WAARSCHUWING:** raak alleen de groengekleurde interne onderdelen aan (met uitzondering van de doorvoerwielen) wanneer de klep van de imager is geopend. Doe ringen, stropdassen, sieraden en andere items af en doe uw haar in een staart, zodat niets in de imager valt of verstrikt raakt.


Ga naar stap 4 als er een kleurenlint is geplaatst. Ga anders naar stap 7.

4. Verwijder het kleurenlint, zoals is aangegeven in de volgende afbeelding.

Opmerking: bescherm het lint tegen stof en vuil zolang dit niet in de imager is geplaatst. Leg het lint niet op een tafel; door statische lading wordt stof van het tafeloppervlak aangetrokken.

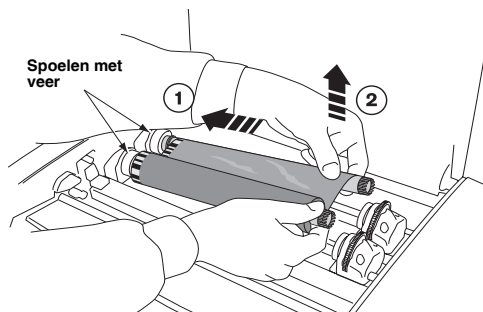


5. Selecteer in het menu Open Top Cover (Bovenklep openen) de menuoptie Move Ribbon Carriage (Lintgeleider verplaatsen).

6. Druk op de knop  om de lintgeleider omlaag te verplaatsen, zodat deze niet in de weg zit.
7. Zoek de printrand en het neusstuk, zoals is aangegeven in de volgende afbeelding.


**LET OP:** voorkom als volgt dat de thermische printkop beschadigt:

- Gebruik alleen het reinigingsdoekje voor de PRINT HEAD (printkop) tijdens het reinigen.
- Raak het glazen oppervlak van de printkop niet aan met uw vingers; u wordt geadviseerd handschoenen te dragen.

**WAARSCHUWING:** de thermische printkop kan heet zijn.

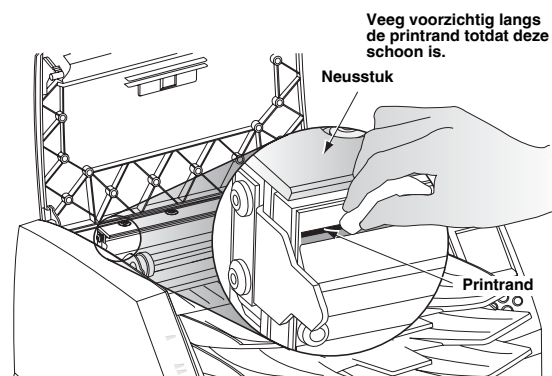

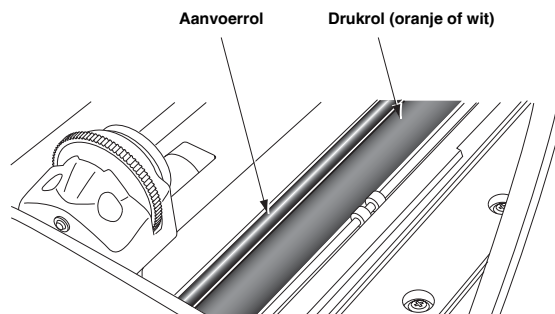

8. Veeg voorzichtig heen en weer langs de volledige afdruklijn met het reinigingsdoekje voor de PRINT HEAD (printkop), dat is meegeleverd in het reinigingspakket voor de imager. Druk hierbij niet te hard met het doekje op de printkop. Mogelijk verkleurt het reinigingsdoekje. Herhaal de heen- en weergaande beweging totdat de printrand volledig schoon is.
9. Verwijder stof of ander vuil van het neusstuk.
10. Kijk vanaf de zijkant van de imager en zoek de oranje of witte drukrol en de aanvoerrol, zoals is aangegeven in de volgende figuur.



11. Als het menu Move Ribbon Carriage (Lintgeleider verplaatsen) wordt geopend, drukt u op de knop  om terug te keren naar het menu Open Top Cover (Bovenklep openen).
12. Selecteer in het menu Open Top Cover (Bovenklep openen) de menuoptie Rotate Platen (Drukrol draaien).  
Het menu Rotate Platen (Drukrol draaien) wordt geopend.

13. Wrijf het reinigingsdoekje voor de PLATEN ROLLER (drukrol), dat is meegeleverd in het reinigingspakket voor de imager, steeds in één richting langs de gehele lengte van de drukrol totdat al het zichtbare vuil volledig is verwijderd.

Druk op de knop  of  om de drukrol te draaien, zodat u het volledige oppervlak kunt reinigen.


**LET OP:** Gebruik alleen het reinigingsdoekje voor de PLATEN ROLLER (drukrol) om deze te reinigen. U kunt de drukrol beschadigen als u het reinigingsdoekje voor de PRINT HEAD (printkop) gebruikt.

14. Verwijder stof of ander vuil van de aanvoerrol met het reinigingsdoekje voor de PLATEN ROLLER (drukrol) of printkop dat is meegeleverd in het reinigingspakket voor de imager.
15. Wacht totdat de thermische PRINT HEAD (printkop) en de PLATEN ROLLER (drukrol) volledig zijn gedroogd.

**LET OP:** de thermische printkop moet volledig droog zijn voordat u probeert de imager te gebruiken. Als de kop heet wordt terwijl deze nog nat is, treden beschadigingen op.


Ga naar stap 16 als u het kleurenlint opnieuw moet plaatsen. Ga anders naar stap 18.

16. Selecteer in het menu Open Top Cover (Bovenklep openen) de menuoptie Move Ribbon Carriage (Lintgeleider verplaatsen). Druk op de knop  om de lintgeleider weer omhoog te verplaatsen, zodat u het kleurenlint opnieuw kunt aanbrengen.
17. Plaats het kleurenlint opnieuw, zoals is aangegeven in de volgende afbeelding.

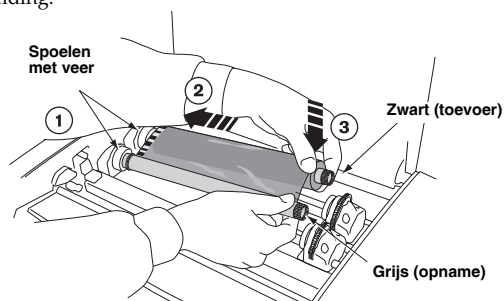


18. Sluit de bovenklep.


## De doorvoerwielen reinigen

1. Druk op de knop  (Pauze) op de imager en wacht totdat de imager is gepauzeerd.
2. Verwijder de opvanglade, zoals is aangegeven in de volgende afbeelding.


**WAARSCHUWING:** raak alleen de groengekleurde interne onderdelen aan (met uitzondering van de doorvoerwielen) wanneer de klep van de imager is geopend. Doe ringen, stropdassen, sieraden en andere items af en doe uw haar in een staart, zodat niets in de imager valt of verstrikt raakt.

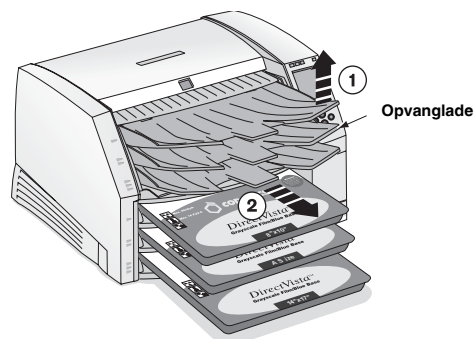

3. Leg de opvanglade op een plat oppervlak, zoals is aangegeven in de volgende afbeelding.

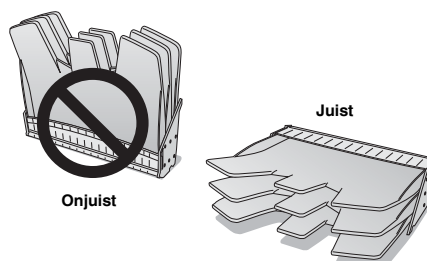

4. Verwijder eventuele cassettes uit de toevoersleuven.
5. Zoek de doorvoerwielen.  
Er zijn drie doorvoerwielen, een voor elke toevoersleuf. Het bovenste doorvoerwiel is weergegeven in de volgende afbeelding.

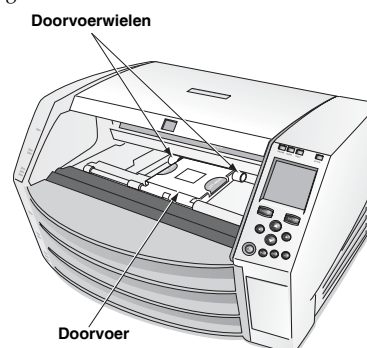

6. Wrijf rond elk doorvoerwiel met het reinigingsdoekje voor de PLATEN ROLLER (drukrol) dat is meegeleverd in het reinigingspakket voor de imager. Mogelijk verkleurt het reinigingsdoekje.

**LET OP:** Raak de doorvoerwielen niet met uw vingers aan; lichaamsolie van de vingers; lichaamsolie van de vingers is moeilijk te verwijderen en kan uiteindelijk de wielen beschadigen. Gebruik alleen het reinigingsdoekje voor de PLATEN ROLLER (drukrol), want met het reinigingsdoekje voor de PRINT HEAD (printkop) kunt u de rol beschadigen.

7. Wacht totdat de doorvoerwielen volledig droog zijn.
8. Plaats de opvanglade en eventuele verwijderde mediacassettes terug.



17991 Englewood Drive  
Middleburg Heights, OH  
44130 Verenigde Staten  
Telefoon: (440) 243-1198  
Fax: (440) 243-1334  
E-mail: info@codonics.com  
www.codonics.com

Codonics Limited KK  
New Shibaura Bldg. F1  
1-3-11, Shibaura  
Minato-ku, Tokio, 105-0023 JAPAN  
Telefoon: 81-3-5730-2297  
Fax: 81-3-5730-2295